

ELECOM

Healthcare

ECLEAR

refree

エクリア リフリー

低周波治療器 P01

添付文書

取扱説明書

HCM-P01 シリーズ

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本書では操作方法と安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。

ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。また、本書を読み終わったあとは、大切に保管してください。

2016年8月作成（第2版）

ELECOM保証書

製品名	★シリアル No.(製品本体に記載)	保証期間
HCM-P01 シリーズ		ご購入日から 1 年間

★お客様ご記入欄

フリガナ

お名前

ご住所

〒

TEL () -

☆ご販売店様

ご購入日

ご住所・店名・TEL・ご担当者名

※お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証書に記載された期間、規程のもとに修理を致します。修理をご依頼の場合は、必ず本保証書を添付してください。また、保証書の再発行は行いませんので、紛失しないように大切に保管してください。

★印の欄は、お客様にご記入いただくものです。☆の欄は、販売店でご記入いただくものです。記入が無い場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。

ご販売店様へ
お客様へ商品をお渡しするときは、必ず☆印の欄に所定事項をご記入ください。記入漏れがあると、保証期間内でも無償修理が受けられませんのでご注意ください。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生ずる危害や損害の程度を次の表示で区分し説明しています。

⚠ 危険	この表示がある項は、「死亡または重傷を負う可能性が高い」内容です。
⚠ 警告	この表示がある項は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示がある項は、「傷害を負う可能性または物的損傷のみが発生する可能性が想定される」内容です。
🚫	この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
🛑	この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。

⚠ 危険	下記のような医用機器との併用は絶対にしないでください。 - ペースメーカーなどの体内埋込型電子機器 - 人工心肺などの生命維持用医用電気機器 - 心電計などの装着型医用電子機器 これら医用機器の誤動作を招き、生命に著しい障害をもたらす原因となります。
------	---

⚠ 警告	
🚫	心臓の近く、頭部、顔、口の中や陰部、皮膚疾患の箇所などに使用しないでください。 事故やケガ、体調不良の原因となります。
🚫	治療以外の目的で使用しないでください。 事故やトラブル、故障の原因となります。
🚫	他の治療機器と同時に使用しないでください。 気分が悪くなるなど、体調不良の原因となります。

パッケージ内容の確認

ご使用前に、すべてが揃っているかを確認してください。なお、梱包には万全を期しておりますが、万一、不足品、破損品などがありましたら、すぐにお買い上げの販売店またはエレコム総合インフォメーションセンター(☎P.27)までご連絡ください。

本体

専用 USB ケーブル

収納ポーチ

ゲルパッド (2 Point Pad)
(消耗部品)

保管用シート

添付文書・取扱説明書（保証書付） 本書

⚠ 警告	
🚫	子供には使用させず、機器本体およびゲルパッドの上で遊ばせたり、上に乗らせたりしないでください。 事故やケガの原因となります。
🚫	ゲルパッドに時計やネックレスなどの金属が触れた状態で使用しないでください。 事故やケガの原因となります。
🚫	ゲルパッドの表面が欠けたり、崩れていたりする状態で使用しないでください。 事故やトラブル、故障の原因となります。
🛑	本体とゲルパッドを接続・取りはずすとき、ゲルパッドを貼る・貼りかえる・はがすときは必ず電源を切ってから行ってください。 感電や故障の原因となります。
🛑	次の方は医師に相談のうえ使用してください。 - 医師の治療を受けている人、又は身体に特に異常を感じている人 - 悪性腫瘍のある人 - 心臓・脳神経に異常のある人 - 妊娠している人、出産直後の人 - 体温 38℃以上（有熱期）の人（※例 1：急性発症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期 ※例 2：衰弱している場合） - 感染症疾患の人 - 皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある人 - 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性（疼痛性）疾患の人 - 安静を必要とする人 - 薬を服用している人 - 血圧に異常のある人 - 四肢の不自由な人 - 自分で意思表示できない人 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 - 低温状態の人 - 血行障害のある人 - しばらく使用しても、効果が現れない人 - ゲルパッドが肌にあわない人 事故や体調不良の原因となります。

■別売品

別売品のご案内は、エレコム総合インフォメーションセンター(☎P.27)までお問い合わせください。

次の別売品をご用意しています。

販売名：ゲルパッド P01
医療機器届出番号：27B2X00293000001

1 Point Pad (2枚入り)

型番：HCM-P01G1

2 Point Pad (2枚入り)

型番：HCM-P01G2

Wide Pad (1枚入り)

型番：HCM-P01G3

⚠ 警告	
🚫	分解や修理、改造をしないでください。 火災や感電の原因となります。
🚫	本製品は一人用です。 複数の人で使用しないでください。 感電・事故の原因となります。

⚠ 注意	
🚫	下記の場所では使用したり、保管したりしないでください。 - 直射日光のあたる場所 - 暖房器具の近くなど、温度の高い場所 - 浴室などの湿気の多い場所 - 水気の近く - ほこりが多い場所 - 振動の多い場所 火災、感電、故障の原因となります。
🚫	就寝時には使用しないでください。 事故やケガの原因となります。
🚫	自動車・バイク・自転車などの運転の直前や運転時には使用しないでください。 事故やトラブルの原因となります。
🚫	長時間ゲルパッドを肌に貼り付けたままにしないでください。 皮膚の炎症などの原因となります。
🚫	ゲルパッドが水に濡れた状態で使用しないでください。 感電の原因となります。
🚫	1 か所 15 分以上使用しないでください。 事故や体調不良の原因となります。
🚫	ゲルパッドを 2 枚重ねた状態で使用しないでください。 感電・事故の原因となります。
🛑	本体とゲルパッドは、正しく確実に接続されていることを確認してからご使用ください。

各部の名称

■本体

[+](強) ボタン

電源ボタン (モード切替ボタン)

LED ランプ

本体

[-](弱) ボタン

USB コネクター差込口 (充電用)

接続端子 (本体側)

■ゲルパッド

ゲルパッド

接続端子 (ゲルパッド側)

保護フィルム

■専用 USB ケーブル

USB A コネクター

USB microB コネクター

⚠ 注意	
🛑	各操作ボタンが正常に動作することを確認してからご使用ください。
🛑	はじめてご使用いただくときや、長時間使用しなかった機器をご使用いただくときには、取扱説明書のとおり操作を行い、正常に動作することを確認してからご使用ください。
🛑	本製品の使用によって、強い刺激や、肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。 事故や体調不良の原因となります。
🚫	USB コネクター差込口に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。 感電・障害・故障の原因となります。
🚫	USB コネクター差込口に金属類を差し込まないでください。 発熱や発火の原因となります。
🚫	ケーブルを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしないでください。 ケーブルが傷ついたり断線したりし、火災や感電の原因となります。
🚫	専用 USB ケーブルが傷んだり、USB コネクター差込口がゆるいときは使用しないでください。 発火や感電の原因となります。
🚫	トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電しないでください。 発熱や発火の原因となります。
🚫	シガーソケットなどを使って、車内で充電しないでください。 発火や発熱、感電の原因となります。
🚫	濡れた手で専用 USB ケーブルやゲルパッドを触らないでください。 感電や故障、事故の原因となります。
🛑	付属の専用 USB ケーブルは本体の充電以外には使用しないでください。専用 USB ケーブルは通信用途やその他の機器の充電には使用できません。
🛑	充電時、専用 USB ケーブルは根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な状態で充電すると、発火や感電の原因となります。

準備

使いはじめ（購入直後や長時間使用しなかったとき）や使用中に電池残量がなくなったときは、必ず満充電になるまで充電してください。

1 充電する

充電時間：約 3.5 時間

① 専用 USB ケーブルの USB micro B コネクターを、本体の USB コネクター差込口に接続し、充電します。
※正しく接続されると、“ピー”と音が鳴り、本体の LED ランプが点滅または点灯します。

LED ランプ

充電残量が 80% 未満のときは赤色に点滅、80% 以上のときは緑色に点滅、満充電のときは緑色に点灯します。

micro Bコネクター

専用USBケーブル

①

USBコネクター差込口

⚠ 注意：

- ・トラベル用コンバーターなどの変圧器を使って充電すると、発熱や発火のおそれがあります。
- ・充電中は操作できません。
- ・本体を繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。極度に短くなったら電池の寿命ですが、電池の交換はできません。

② 充電が完了すると、“ピーッ”と音が鳴ります。

⚠ 注意	
🛑	3 ヶ月に一度は必ず充電してください。 完全放電すると、充電できなくなる場合があります。
🛑	機器に故障が生じたときは、使用を直ちに中止し、電源を切ってください。販売店またはインフォメーションセンターに連絡してください。
🚫	幼児の手が届く場所に置いたり、保管したりしないでください。 事故の原因となります。万一、本体を幼児が飲み込んだときは、直ちに医師に相談してください。
🚫	本体に水や液体を入れたり、本体を濡らしたりしないでください。 発熱、破裂、発火の原因となります。
🛑	本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

2 ゲルパッドを本体に取り付ける

① はじめてお使いになるときは、ゲルパッドを袋から取り出します。
(ゲルパッドについている保護フィルムは、まだはがさないでください。)

② 本体の電源を切り、LED ランプが消えていることを確認します。

LEDランプ

消灯

③ 本体とゲルパッドの接続端子を“カチッ”と音がするまで接続します。

④ 本体とゲルパッドの接続端子を“カチッ”と音がするまで接続します。

⚠ 注意：

ゲルパッドは、当社指定のゲルパッドを必ずご使用ください。

本製品について

■使用目的または効果

本製品は、麻痺した筋肉の委縮を予防し、マッサージ効果を目的とした低周波治療器です。

一般家庭で使用してください。

■低周波治療器とは

人体に着けた電極を通して皮膚表面より微弱な低周波電流を流すと、筋肉が収縮し、筋のポンプ作用及び血管拡張により血行を促進させることで、コリを治療することができます。また、低周波電流は神経にも作用し、脳に痛みを伝えるにくくすることで痛みをやわらげることができます。

■治療時間の目安

1 か所、約 15 分が治療時間の目安です。15 分以上続けると、体調不良の原因になることがあります。

本製品は、治療開始から約 15 分経過すると、自動的に電源が切れるタイマーを内蔵しています。

■効果的な治療時期

お風呂上がりに治療すると効果的です。身体が温まっているため、血行促進効果も高まります。

⚠ 注意：

皮膚の汗や水分はよく拭き取ってから使用してください。

■ゲルパッドを交換するときは

① 本体をゲルパッドから取り外します。

② ゲルパッドを袋から取り出します。
(ゲルパッドについている保護フィルムは、まだはがさないでください。)

③ 本体の電源が切れている（LED ランプが消えている）ことを確認します。


④ 本体とゲルパッドの接続端子を“カチッ”と音がするまで接続します。

⚠ 注意：

ゲルパッドを交換するときは、ゲルパッドの取扱説明書も合わせてお読みください。

ゲルパッドの装着

1 ゲルパッドの保護フィルムをつまみを持ってはがす

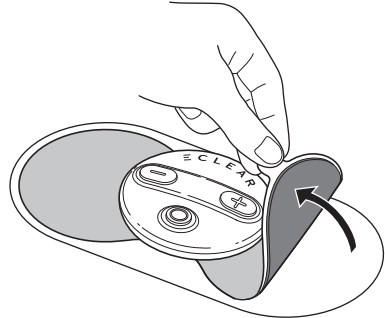

※2回目以降は保管用シートからはがしてご使用ください。

2 ゲルパッドを治療したい部分に貼り付ける

ゲルパッドは肌に密着させて貼ってください。
※ゲルパッドが肌から離れると、本体の電源が自動的に切れます。

△ 注意：

ゲルパッドをネックレスなど金属の上に貼らないでください。

■ゲルパッドの取り扱いについて


- ゲルパッドの貼り付け面は触らないでください。貼り付きにくくなったときは、「ゲルパッドのお手入れ」(▶P.19)をご覧ください。
- ゲルパッドは折り曲げないでください。

14

ゲルパッドの貼りつけ例


肩 - 僧帽筋 -

コリを感じる部位に貼りつける

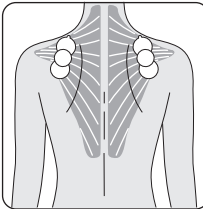


二の腕 - 上腕筋群 -

二の腕のコリを感じる部位に貼りつける

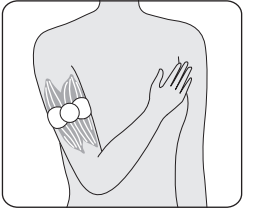


腕 - 前腕屈筋群 -

腕のコリを感じる部位に貼りつける

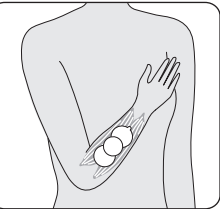

背中・腰 - 脊柱起立筋 -

背骨の筋肉の外側で、コリのある部位に貼りつける

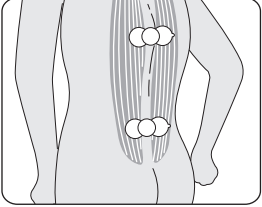


腰 - 大腰筋 -

前脚のつけねの一番高い部位に貼りつける




おしり - 大臀筋 -

おしりの一番高い部位に貼りつける

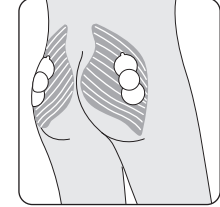


ふともも - ハムストリング筋 -

コリや痛みのある部位に貼りつける

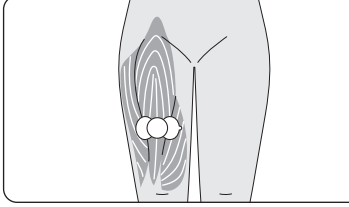

ふくらはぎ - 下腿三頭筋 -

コリのある部位に貼りつける

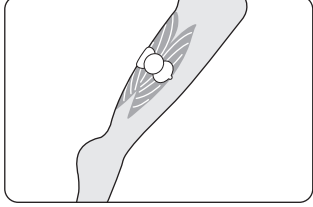


15

治療


1 電源を入れる

電源ボタンを約2秒間長押しすると、「ピーツ」と音が鳴り、電源が入り、治療が始まります。
LEDランプが緑色に点灯します。

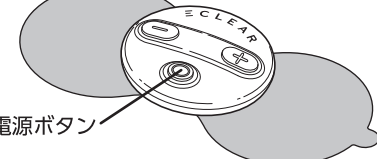

2 モードを切り替える


治療中に電源ボタンを押すと、モードを切り替えることができます。
※電源を入れたときは常に「おまかせ」モードで開始します。
・電源ボタンを押すたびに「ピツ」と音が鳴り、下記のように切り替わります。「おまかせ」モードに戻ると「ピーツ」と音が鳴ります。
神経痛など痛みを感じる部位には「深層指圧」がおすすめです。

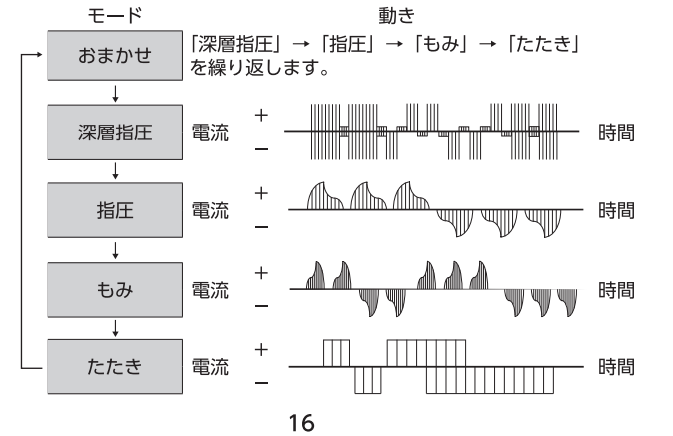

16

3 強さを調整する

10段階のレベルからお好みの強さを選びます。
※最初に電源を入れたとき、またはモードを変更したときの強さはレベル「1」です。
・[+] (強) ボタンを押すと、「ピツ」と音が鳴り、強さが1段階上がります。
・[-] (弱) ボタンを押すと「ピピツ」と音が鳴り、強さが1段階下がります。
・レベル「10」で[+] (強) ボタン、レベル「1」で[-] (弱) ボタンを押した場合は、「ピピピツ」と音が鳴り、レベルは変更されません。
[-] (弱) ボタン

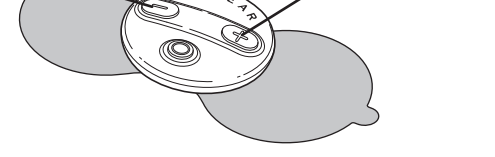

17

4 電源を切る


治療開始から約15分経過すると、「ピーツ」と音が鳴り、自動的に電源が切れます。
※治療中に電源を切るには、電源ボタン、[+] (強) ボタン、[-] (弱) ボタンのいずれかのボタンを約2秒間長押しします。
※ゲルパッドが肌から外れたり、ゲルパッドから本体を取り外した場合も、電源が切れます。




17

5 収納する

① ゲルパッドを肌からはがします。
ゲルパッドの粘着面にふれず、つまみを持ってはがします。
※Wide Pad の場合はつまみを2つとも持ってはがしてください。

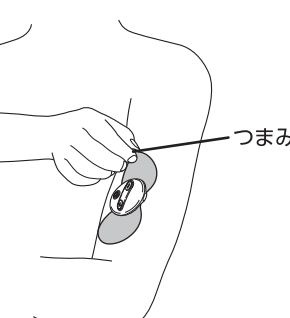

② 本体とゲルパッドは取り外さずに、保管用シートに貼り付けます。
※2個入りの場合は、保管用シートの両面に貼り付けてください。

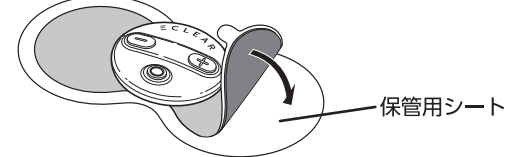

③ 付属の収納ポーチに入れて保管します。



△ 注意：
温度や湿度の高いところや、直射日光のあたるところに置かないでください。

18

製品仕様

販売名	低周波治療器 P01
類別	機械器具 78 家庭用電気治療器
一般的名称	家庭用低周波治療器 (コード：70986000)
医療機器の種類	管理医療機器
医療機器認証番号	228ADBZX00037000
電源電圧	DC 5.0V ±5% (リチウムイオン電池)
内蔵電池	40mAh ※ 1 ※ 2
くり返し充電回数	約 500 回 ※ 1
充電時間	約 3.5 時間 ※ 3
動作時間	約 150 分 (満充電時) ※ 4
最大出力電流	約 10mA 以下
定格出力電圧	約 32V
基本周波数	約 2 ~ 550Hz
出力パルス幅	約 200μs
消費電力	約 0.2W
タイマー	約 15 分
本体寸法	約 φ44mm × D11mm
ケーブル長	約 200mm
本体質量	約 13g
使用環境温湿度	0℃ ~ 40℃ 20 ~ 85% RH
保管環境温湿度	-10℃ ~ 60℃ 20 ~ 85% RH
製造販売元	エレコムヘルスケア株式会社 大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー 8F
製造元	ZHANGZHOU EASEPAL INDUSTRIAL CORPORATION
生産国	中国

※1 JIS C 8711に基づく
※2 過充電、過放電、過電圧保護機能搭載
※3 使い切った電池を満充電する場合の目安
※4 動作内容、使用環境により変化します。

25

お手入れについて


本体からゲルパッドを外した状態で、お手入れしてください。

■ゲルパッドのお手入れ (お手入れ目安:30回程度ご使用毎に1回)


以下の場合に、ゲルパッドのお手入れをしてください。

- ゲルパッドが貼り付きにくくなったとき
- 治療時の刺激が弱くなったとき
- 治療時にビリビリした刺激を感じるとき
- ゲルパッドが汚れたとき
- ゲルパッドが保管用シートに貼り付かないとき


お手入れしても刺激が弱くなってきたり、ビリビリ感を感じたりする場合は、ゲルパッドを交換してください。

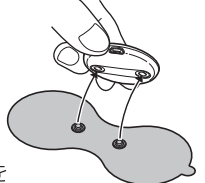

① 少量の水をかけながら、指先で軽く数秒洗います。
※水をかけすぎないでください。粘着力の低下や、粘着面が傷む原因になります。

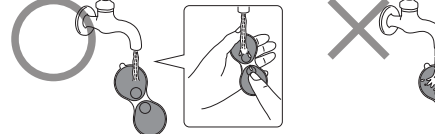

② つまみを持って十分に水を切り、自然乾燥させます。
※乾燥が不十分な場合、粘着力が弱くなります。
※ティッシュや布などで粘着面を拭かないでください。
※直射日光は避けてください。

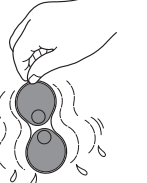

■本体のお手入れ

- 本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き取ってください。

△ 注意：

本体内部、USB コネクター差込口に水などが入らないように注意してください。

19

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間 (本製品ご購入日から起算されます。) 内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■無償保証範囲

2. 以下の場合には、保証対象外となります。

- 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
- 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書 (レシート・納品書など) をご提示いただけない場合。
- 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
- 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
- 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
- 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。
- 保証書を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
- 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
- その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼は、本保証書に本製品に添えて、お買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理センターへ送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段 (宅配や簡易書留など) をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただきます場合があります。
6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

7. 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
8. 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の賠償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。

■有効範囲

9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
10. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

26

保管のしかた

本製品は、次の条件を満たしている環境で保管してください。

保管温度：-10℃ ~ 60℃

保管湿度：20 ~ 85% RH

■お手入れと保管時のご注意

- お手入れをするとき、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 下記の場所には保管しないでください。
 - 直射日光のあたる場所
 - 高温、多湿、水気の近く、ほこりが多い場所
 - 振動の多い場所
 - 化学薬品の保管場所や腐食性ガスが発生する場所
- 幼児の手が届かない場所に置いてください。



- 長時間ご使用にならないときは、フル充電の状態ですできるだけ常温 (10 ~ 30℃) で保管してください。
- 3ヵ月に1度は充電してください。完全放電すると充電できなくなる場合があります。

長年ご使用の低周波治療器の点検を!		
 こんな 症状はあり ませんか?	●充電中、動作中に異常な音・振動がある ●本体が異常に熱い ●本体が変形していたり、こげ臭いにおいがする	▶ ご使用 中止 事故防止のため、 製品の電源を切る。 または専用 USB ケーブル を抜いて、必ず販売店に 点検をご依頼ください。

20

廃棄するときは

■リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い



Li-ion

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。本製品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

- 廃棄するときは、電池を分解しないでください。
- 本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ゴミ収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。

■リチウムイオン電池の取り出ししかた

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

△ 警告	下記の手順は、製品を廃棄するためのものであり修理用のものではありません。 分解した場合は修復不可能です。
------	---


- 充電残量がある場合は、電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

① 本体電源ボタン真下付近の溝にマイナスドライバーを差し込み開ける

② 基板を留めているねじを外す

③ 基板の裏にある電池のコードをニッパでマイナスの黒いコードから切る

④ 電池を取り外す

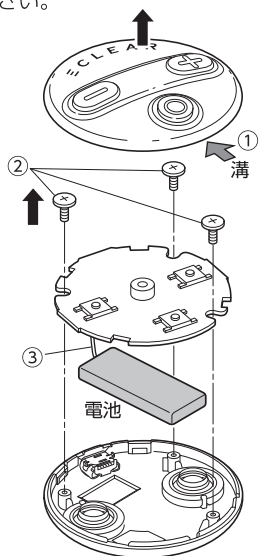

●取り出した電池は、⊕と⊖の端子をショートさせないように注意し、端子部にテープを貼り絶縁してください。

22

こんなときは

こんなとき	原 因	対応のしかた
電源が入らない	電池の充電が不十分または、充電が切れている	電源を切り、充電をおこなってください。▶P.11
	電池の充電中	電池の充電が終了してから、専用 USB ケーブルを抜いてご使用ください。▶P.11
電源がすぐ切れる 使用中に電源が切れる	電池の充電が不十分または、充電が切れている	電源を切り、充電をおこなってください。▶P.11
	本体とゲルパッドの接続が不十分 ゲルパッドと肌に正しく密着していない	電源を切り、本体とゲルパッドの接続をやりなおしてください。▶P.12・P.13 電源を切り、肌に密着させてください。▶P.14
充電できない	長期間保管し、電池が完全放電した	ご使用できません。完全放電させないように3ヶ月に1度、充電してください。▶P.21・P.22
ゲルパッドが肌に貼りつかない	ゲルパッド粘着面の透明の保護フィルムをはがしていない	粘着面の透明の保護フィルムをはがしてください。▶P.14
	ゲルパッドの粘着面が汚れている	少量の流水にさらしながら、指先で軽く数秒洗ってください。▶P.19
	水洗い直後に使用している	十分に水分を切って、粘着面を自然乾燥させてください。▶P.19
ゲルパッドの粘着面が傷んでいる	ゲルパッドの粘着面が腐んでいる	ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が腐んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。▶P.9
	ゲルパッドの粘着面に汗や水分が多がついた	ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が腐んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。▶P.9
ゲルパッドの粘着面はがれる、ずれる	ゲルパッドの粘着面に汗や水分が多がついた	ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が腐んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。▶P.9
	ゲルパッドが肌に密着していない	肌に密着させてください。▶P.14
刺激を感じない / 刺激が弱い	ゲルパッドを重ねて貼っている	重ならないように貼ってください。▶P.14
	ゲルパッドの粘着面が汚れている	少量の流水にさらしながら、指先で軽く数秒洗ってください。▶P.19
強さ調節が弱くなっている	ゲルパッドを正しく接続していない	カチツと音がするように、正しく接続してください。▶P.12
	強さ調節が弱くなっている	強さ調節してください。▶P.17
充電が不十分または電池が消耗している	充電が不十分または電池が消耗している	充電してください。▶P.11
	ゲルパッドの粘着面が汚れている、腐んでいる	ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が腐んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。▶P.9
肌が赤くなる / 肌がチクチクする	治療時間が長すぎる	1か所 15分以内で使用し、使用後はゲルパッドを肌からはがしてください。▶P.18
	ゲルパッドが肌に密着していない	肌に密着させてください。▶P.14
ゲルパッドの粘着面が汚れたり、乾いたりしている	ゲルパッドの粘着面が汚れたり、乾いたりしている	少量の流水にさらしながら、指先で軽く数秒洗ってください。▶P.19
	ゲルパッドの粘着面が腐んでいる	ゲルパッドは消耗部品です。粘着面が腐んだときは使用を中止し、別売品をお求めください。▶P.9

23

24

21